

tioniert, reicht es, wenn Sie die untere Batterie austauschen. - Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gern.

Wartung und Pflege

Alle MiniVib-Produkte sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung reinigen Sie den Wecker mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Niemals starke oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Zur Desinfektion benutzen Sie bitte ausschließlich haushaltsübliche Mittel. Beachten Sie hierzu auch die Pflegehinweise im vorstehenden Kapitel Wartung und Pflege.

Garantie

Auf alle HGT-Produkte geben wir eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur und den Rückversand. Die Kosten des Versands an uns und weitere Kosten tragen wir nicht.

Gesendete Blitz- und Vibrationsfolgen

Beim Erreichen der Weckzeit (ALARM) sendet der Wecker Funksignale aus. Die vorhandenen Empfänger reagieren darauf mit Blitz- oder Vibrationsfolgen. Außerdem können Sie an der Kontrollanzeige des Empfängers erkennen, von welchem Sender ein Ereignis gemeldet wird:

Sender	Blitz- und Vibrationsfolge	Anzeige
Klingel 1 (Haustür):	* * * * *	
Klingel 2 (Etagentür):	*** **	
Telefon 1 (Festnetz):	* * *	
Telefon 2 (Handy):	**** **	
Baby-Sender:	* * * * *	
Personenruf-Sender:	** ** ** ** **	
Digitalwecker:	* * * * *	
Rauchwarnmelder:	*****	

Technische Daten

- Stromversorgung: 2 Batterien AAA 1,5V (Microzelle)
- Abmessungen: 72 x 122 x 51 mm
- Gewicht: ca. 170 g (inkl. Batterien)
- Prüfzeichen:
- Farbe: schwarz
- Geeignete Empfänger: HGT-Drahtloses Vibrationskissen Typ 83.0
HGT-Funkblitzlampe Control Typ 82.2
HGT-Funkempfänger Typ 92.5



BA_8600_MVDIGITALWECKER 04/17

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Siemensstraße 13 • 48341 Altenberge • Tel. 02505/603 • FAX 02505/3659
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: info@hgt.de


**Digitalwecker
Typ 86.0**



Bedienungsanleitung



● Digitalwecker

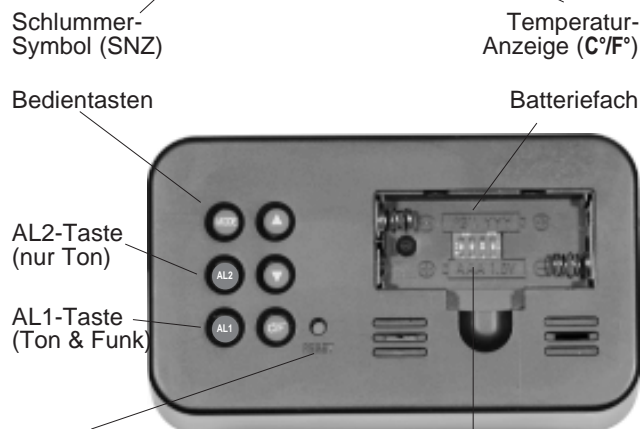

Werkseinstellung = Kanal 0

- Schalter -				- Schalter -					
Kanal	1	2	3	4	Kanal	1	2	3	4
0	off	off	off	off	4	off	off	on	x
1	on	off	off	x	5	on	off	on	x
2	off	on	off	x	6	off	on	on	x
3	on	on	off	x	7	on	on	on	x

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfach zu handhabende HGT-MiniVib-System entschieden. Der Digitalwecker ist ein Sender des HGT-MiniVib-Systems ohne eigene Blitzlampe. Sie können also selbst entscheiden, ob Sie sich von der Funkblitzlampe Control oder vom Drahtlosen Vibrationskissen wecken lassen wollen.

Inbetriebnahme des Weckers

Öffnen sie das Batteriefach, legen Sie die mitgelieferten Batterien ein und schließen Sie das Batteriefach wieder. Nach kurzer Zeit beginnt das Radioempfang-Symbol im Display zu blinken, um Ihnen anzuzeigen, dass die Uhr versucht, die Uhrzeit zu empfangen. - Wenn die korrekte Uhrzeit nicht nach max. 5 Minuten angezeigt wird, stellen Sie die Uhr bitte an einer anderen Stelle auf und starten Sie den Empfang erneut, indem Sie die **RESET**-Taste drücken. Sollte der Empfang nicht möglich sein, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

Drücken Sie auf **MODE** und halten Sie die Taste für 3 Sek. gedrückt. Mit der **▲**-Taste können nun Sie wählen, ob die Uhrzeit im 12- oder 24h-Modus angezeigt werden soll. Danach drücken Sie bitte wieder auf **MODE**. Mit **▲** und **▼** können Sie nun die Zeitzone einstellen. Für Zentraleuropa lassen Sie die Anzeige auf 00. Drücken Sie wieder auf **MODE**, um die Stunde mit Hilfe von **▲** und **▼** einzustellen. Mit **MODE** springen Sie jetzt zur Minuteneingabe. Drücken Sie immer wieder auf **MODE**, bis Sie Jahr, Monat, Tag und die Sprache für die Wochentaganzeige gewählt haben. Ein letzter Druck auf **MODE** führt Sie zum Normalbetrieb.

Weckzeit (Alarmzeit) einstellen

Drücken Sie auf **AL1** und halten Sie die Taste für 3 Sek. gedrückt. Mit **▲** und **▼** können Sie nun die Stunde der Alarmzeit einstellen. Nach einem Druck auf **MODE** können Sie mit **▲** und **▼** die Minute der Weckzeit einstellen.

Alarm aktivieren / deaktivieren

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren drücken Sie einmal kurz auf **AL1**. Beim Aktivieren wird der Alarm 1x gesendet und das Alarmsymbol wird dauerhaft angezeigt.

Weckvorgang beenden

Der Weckvorgang kann durch einmaligen Druck auf die Schlummer-taste für 5 Minuten unterbrochen werden. In dieser Zeit leuchtet das Schlummer-Symbol (SNZ). Zum Beenden der Schlummerfunktion drücken Sie auf eine beliebige Taste außer der Schlummer-Taste.

Funkkanal einstellen

Im Batteriefach befindet sich ein 4-fach-Schiebeschalter, mit dem Sie den Funkkanal einstellen können, auf dem der Wecker sendet. Sie sollten die Werkseinstellung 0000 = Kanal 0 nur dann verändern, wenn sich in der Nähe weitere HGT-Digitalwecker befinden.

Akustischer Alarm

Zusätzlich zum Senden des Alarmsignals an HGT-Empfänger macht

der Wecker selbst auch einen akustischen Alarm (Piepstöne). Der akustische Alarm ist nicht getrennt abschaltbar.

Displaybeleuchtung

Mit einem kurzen Druck auf die Schlummertaste (**Snooze/Light**) wird die Beleuchtung des Weckers für 5 Sek. eingeschaltet und die Weckfunktion getestet.

Weckfunktion testen

Wird die Schlummertaste bei aktiviertem Alarm gedrückt, muss danach am Empfänger dann das Weckersymbol leuchten. Wird die Schlummertaste gedrückt und länger als 8 Sek. festgehalten, wird ein aktives Wecksignal gesendet und Vibrationskissen und Funkblitzlampe müssen das Wecken signalisieren.

Bei Störungen

Sollte Ihr Wecker einmal nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob alle Batterien noch voll sind. Wenn nur die Displaybeleuchtung nicht mehr funk-