

mit dem Sie die Funkverbindung zwischen Sender und der Blitzlampe testen können. Wenn Sie diesen Testknopf betätigen, muss die *Funkblitzlampe* die zugehörige Blitzfolge abgeben (siehe Blitzfolgen).

**Bei Störungen**

Sollte Ihr MiniVib-System einmal nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Batterien in den Sendern noch voll sind. - Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an oder

schreiben uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gern.

**Wartung und Pflege**

Alle MiniVib-Produkte sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie es mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Niemals starke oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

**Wiedereinsatz**

Das Produkt ist für den Wiederein-

**Blitzfolgen und Kontrollanzeige**

An der Blitzfolge können Sie erkennen, welches Ereignis gemeldet wird. Die Kontrollanzeige zeigt, zu welchen Sendern eine Verbindung besteht:

Sender	Blitzfolge	Anzeige
Klingel 1 (Haustür):	* * * * *	
Klingel 2 (Etagentür):	*** **	
Telefon 1 (Festnetz):	* * *	
Telefon 2 (Handy):	**** **	
Baby-Sender:	* * * * *	
Personenruf-Sender:	** ** ** **	
Digitalwecker:	* * * *	
Rauchwarnmelder:	*****	

satz geeignet. Zur Desinfektion benutzen Sie bitte ausschließlich haushaltsübliche Mittel. Beachten Sie hierzu auch die Pflegehinweise im vorstehenden Kapitel *Wartung und Pflege*.

**Garantie**

Auf alle HGT-Produkte geben wir eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur und den Rückversand. Die Kosten des Versands an uns und weitere Kosten tragen wir nicht.

**Technische Daten**

- Stromversorgung: 230 V~, 50 Hz, 2 Watt
- Größe: 90 x 122 x 65 mm
- Gewicht: ca. 185 g
- Prüfzeichen:
- Farbe: weiß
- Zubehör: Aufstellfuß für Blitzlampe Control
- Geeignete Sender: HGT-Digitalwecker 86.0  
HGT-Rauchwarnmelder 89.0  
HGT-Kombisender 88.0



BA\_8220\_LMVBLEITZLAMPE CONTROL 03/14


**Funkblitzlampe Control Typ 82.2**



**Bedienungsanleitung**



Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.  
Siemensstraße 13 • 48341 Altenberge • Tel. 02505/603 • FAX 02505/3659  
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: [info@hgt.de](mailto:info@hgt.de)

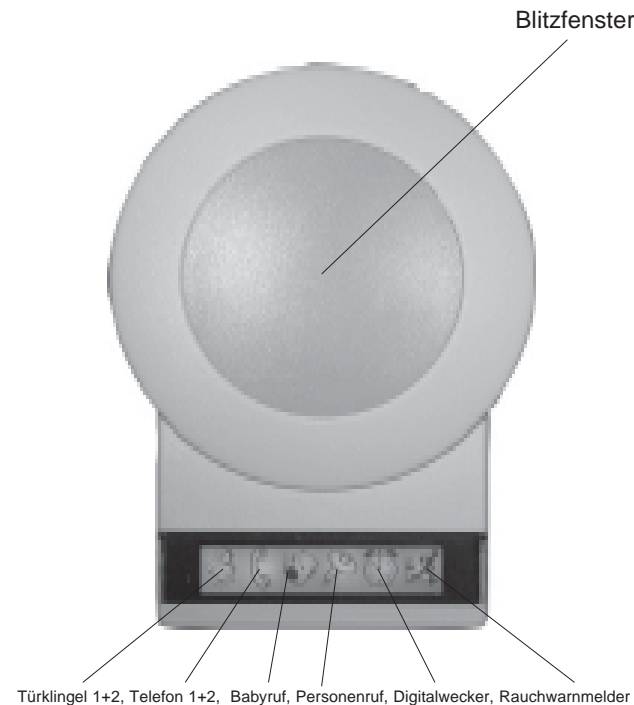

### Beleuchtete Kontrollanzeige:

- Dauerlicht = Die Funkverbindung zum Sender ist OK
- Schnelles Blinken = Ein Sender meldet ein Ereignis
- Langsames Blinken = Die Batterie im Sender ist leer

### Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfach zu handhabende HGT-MiniVib-System entschieden.

Ihre neue *Funkblitzlampe* ist ein Empfänger des HGT-MiniVib-Systems. Zum Betrieb der Blitzlampe ist immer mindestens ein MiniVib-Sender (z. B. Digitalwecker, Rauchwarnmelder oder Kombisender) erforderlich.

Die *Funkblitzlampe* empfängt die Signale der Sender, reagiert darauf mit verschiedenen Blitzfolgen und zeigt die Ereignisse auf sechs Leuchtfeldern an. (Siehe hierzu auch Abschnitt Blitzfolgen auf der Rückseite).

### Inbetriebnahme der Funkblitzlampe

Zur Inbetriebnahme müssen Sie Ihre neue Funkblitzlampe nur in eine freie 230V-Steckdose stecken.

### Kanal einstellen

Nach dem Einstecken blinken zunächst jeweils 3 der 6 Leuchtsymbole abwechselnd auf.

Wenn Ihre Sender noch auf dem werksseitig eingestellten Kanal 0 eingestellt sind, müssen Sie nichts tun. - Wenn Ihre Sender auf einem anderen Kanal eingestellt sind, müssen Sie innerhalb von 60 Sekunden von einem Ihrer Sender ein aktives Signal (z. B. Rauchalarm oder Digitalwecker-Alarm) schicken, damit die Funkblitzlampe diesen Kanal übernimmt.

### Die Kontrollanzeige

Jeder Sender des MiniVib-Systems sendet in regelmäßigen Abständen Kontrollsignale aus. Werden diese Signale empfangen, zeigt die Blitzlampe durch andauerndes Leuchten des entsprechenden Symbols an, dass die Funkverbindung in Ordnung ist. Ein kurzer Blick auf die Blitzlampe gibt Ihnen so jederzeit Gewissheit, dass Ihr HGT-MiniVib-System einwandfrei arbeitet.

### Dauerlicht = Funkverbindung ist OK!

Die ordnungsgemäße Funkverbindung zwischen den einzelnen Mi-

niVib-Sendern und Ihrer *Funkblitzlampe* wird durch Dauerlicht des zugehörigen Symbols angezeigt.



**Klingel-Sender 1+2**



**Telefon-Sender 1+2**



**Baby-Sender**



**Personenruf-Sender**



**Digitalwecker**



**Rauchwarnmelder**

### Schnelles Blinken = Ein Sender meldet ein Ereignis!

Am Blinken des betreffenden Leuchtsymbols können Sie noch 30 Sekunden nach dem Ende der Blitzfolge eindeutig erkennen, von welchem Sender das Ereignis gemeldet wurde.

### Langsames Blinken = Batterie wechseln

Langsames Blinken eines Symbols zeigt an, dass die Batterie im Sen-

der bald leer ist und möglichst bald durch eine Neue ersetzt werden muss. Bitte warten Sie nicht so lange, bis das Symbol des Senders garnicht mehr angezeigt wird.

### Beispiel:

Sie haben einen Rauchwarnmelder und einen Digitalwecker.

Wenn Sie beim Rauchwarnmelder die Batterie einsetzen und anschließend kurz auf die Test&Stumm-Taste drücken, leuchtet kurze Zeit später das Rauchwarnmelder-Symbol (☹) im Display der Funkblitzlampe. Wenn Sie beim Digitalwecker den Alarm einschalten, leuchtet kurze Zeit später das Wecker-Symbol (🕒) im Display auf.

Das bedeutet: Rauchwarnmelder und Digitalwecker sind bereit. Beginnt irgendwann das Leuchtsymbol für den Rauchmelder langsam zu blinken, ohne dass die Blitzlampe blitzt, bedeutet das, dass die Batterie im Rauchwarnmelder gewechselt werden muss.

### Funktionsprüfung (Test)

Jeder Sender hat einen Testknopf,