

(langsam). Wenn jemand an der Wohnungstür klingelt, macht die Blitzlampe 4 mal 3 Lichtblitze (schnell) und das Klingelsymbol blinkt 30 Sekunden lang (schnell).

Wenn Sie also einen HGT-Klingel-Sender mit zwei Eingängen besitzen, können Sie die Haus- und die Wohnungstürklingel an den unterschiedlichen Blitz- und Blinkfolgen eindeutig auseinanderhalten.

**Blitzfolgen**

Sie können an der Blitzfolge und an der Kontrollanzeige erkennen, von welchem Sender ein Ereignis gemeldet wird:

Sender	Blitzfolge	Anzeige
<b>Klingel 1 (Haustür):</b>	* * * * *	
<b>Klingel 2 (Etagentür):</b>	*** **	
<b>Telefon 1 (Festnetz):</b>	* * *	
<b>Telefon 2 (Handy):</b>	**** **	
<b>Baby-Sender:</b>	* * * * *	
<b>Personenruf-Sender:</b>	** ** **	
<b>Bewegungs-Sender:</b>	* * * *	
<b>Alarm-Sender:</b>	*****	

**Funktionsprüfung (Test)**

Jeder Sender hat einen Testknopf. Wenn Sie diesen Testknopf betätigen, muss die *Blitzlampe Funk* die zugehörige Blitzfolge abgeben (siehe Blitzfolgen).

**Bei Störungen**

Sollte Ihr HGT-Lichtsystem nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob alle Geräte eingeschaltet und auf den *gleichen Kanal* eingestellt sind. Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.

**Technische Daten**

- Stromversorgung: 230 V~, 50 Hz, 2 Watt
- Größe: 90 x 122 x 65 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Prüfzeichen:
- Farbe: weiß
- Sonder-Zubehör: Aufstellfuß, Vibrationskissen

**Blitzlampe Funk  
Typ 92.2**




**Bedienungsanleitung**



BA\_9220\_MVBLFUNK 02/13

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.  
Siemensstraße 13 • 48341 Altenberge • Tel. 02505/603 • FAX 02505/3659  
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: [info@hgt.de](mailto:info@hgt.de)



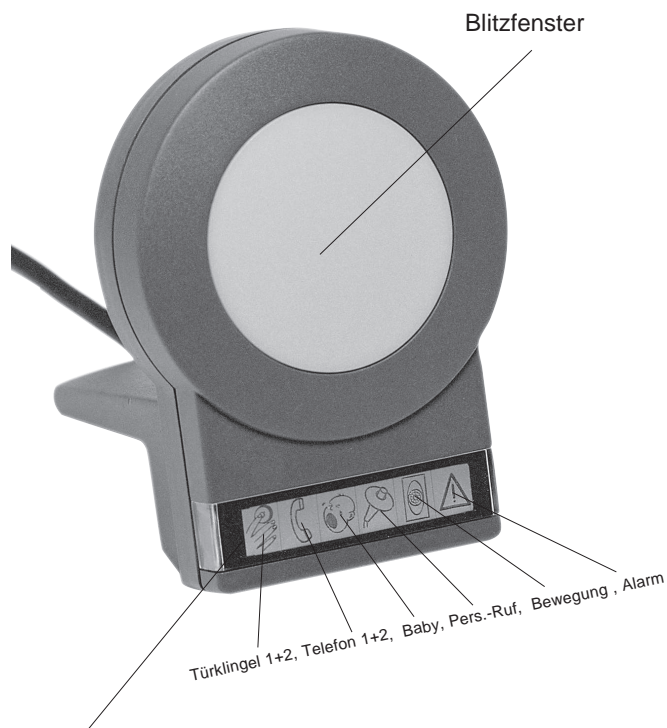

Beleuchtete Kontrollanzeige

Blinken bedeutet: Ein Sender meldet ein Ereignis,  
Dauerlicht bedeutet: Funkverbindung ist OK

**Herzlichen Glückwunsch!**

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das zuverlässige und einfach zu handhabende HGT-MiniVib-System entschieden.

**Allgemeine Hinweise zum MiniVib-System**

Die *Blitzlampe Funk* ist wie der MiniVib-Vibrationsempfänger ein Empfänger des HGT-MiniVib-Systems. Deshalb sind zum Betrieb immer auch ein oder mehrere MiniVib-Sender (Funksensor, Funkumsetzer oder Handsender) erforderlich.

**Das Funktionsprinzip der HGT-Blitzlampe Funk**

Bei der *Blitzlampe Funk* erfolgt die Datenübertragung nicht, wie beim HGT-Lichtsystem über das Lichtnetz (von Steckdose zu Steckdose), sondern über eingebaute Antennen per Funk durch die Luft. Die von den MiniVib-Sendern gemeldeten Ereignisse werden durch verschiedene Blitzfolgen und auf sechs Leuchtfeldern angezeigt. (Siehe auch Abschnitt Blitzfolgen auf der

Rückseite).

**Kanal einstellen**

Damit Ihre neue Blitzlampe mit den MiniVib-Sendern in Ihrer Wohnung zusammenarbeitet, stellen Sie die Kanaleinstellschraube an der Rückseite des Gerätes mit einer Münze auf den gleichen Buchstaben ein, auf den auch Ihre Sender eingestellt sind.

Hinweis: Der Kanal H besitzt eine Sonderfunktion. Wird ein MiniVib-Sender auf Kanal H eingestellt, werden seine Signale von jeder *Blitzlampe Funk* empfangen, unabhängig davon, auf welchem Kanal sie selbst eingestellt ist.

**Kontroll-Code-System**

Jeder Sender des MiniVib-Systems sendet einmal pro Minute ein Kontrollsignal aus. Wenn die *Blitzlampe Funk* dieses Signal empfängt, zeigt sie durch andauerndes Leuchten des entsprechenden Leuchtsymbols auf der Kontrollanzeige an, dass die Funkverbindung in Ordnung ist. Ein kurzer Blick auf die Blitzlampe gibt Ihnen so die jeder-

zeit Gewissheit, dass Ihr HGT-MiniVib-System einwandfrei arbeitet.

**Die Kontrollanzeige**

Jedem einzelnen Sender ist ein eigenes, großflächiges Leuchtsymbol zugeordnet.

**Dauerlicht bedeutet: Funkverbindung ist OK!**

Die ordnungsgemäße Funkverbindung zwischen den einzelnen MiniVib-Sendern und der *Blitzlampe Funk* wird durch Dauerlicht des zugehörigen Leuchtsymbols angezeigt.



**Klingel-Sender 1+2**



**Telefon-Sender 1+2**



**Baby-Sender**



**Personenruf-Sender**



**Bewegungs-Sender**



**Alarm-Sender**

**Blinken bedeutet: Ein Sender meldet ein Ereignis!**

Am Blinken des betreffenden Leucht-Symbols können Sie noch 30 Sekunden nach dem Ende der Blitzfolge eindeutig erkennen, von welchem Sender das Ereignis gemeldet wurde.

**Beispiel:**

Sie haben einen Klingel-Sender mit zwei Eingängen und einen MiniVib-Funkumsetzer zur Umsetzung der Lichtsystem-Signale auf HGT-MiniVib.

An Eingang 1 des Klingel-Senders ist die Haustürklingel, an Eingang 2 ist die Wohnungstürklingel angeschlossen. Wenn Sie den Klingel-Sender in eine Steckdose stecken, leuchtet kurze Zeit später das Klingel-Symbol (🔔) am Funkumsetzer und etwas später auch das Klingel-Symbol an der Blitzlampe Funk. Das bedeutet: Klingel-Sender und Funkumsetzer sind bereit.

Klingelt nun jemand an der Haustür, macht die Blitzlampe 1 mal 8 Lichtblitze (langsam) und das Klingel-Symbol blinkt 30 Sekunden lang