

MultiFlash-Control MV

Typ 98.3

Funktion: Die MultiFlash-Control MV ist gleichzeitig Sender und Empfänger des HGT-Lichtsystems und Sender des MiniVib-Systems. Sie empfängt die unterschiedlichen Blitzsignale, die von anderen Lichtsystem-Sendern in der Wohnung ausgesendet werden, z.B. wenn ein Klingel-Sender das Türklingeln oder ein Babysender das Weinen des Babys (Baby-Sender) meldet.

Als Lichtsystem-Sender reagiert sie u.a. auf direkt angeschlossene Türklingeln oder ein Telefon/Fax, indem sie bei deren Aktivität selbst blitzt und gleichzeitig Signale an andere Blitzlampen in der Wohnung schickt, damit auch diese blitzen können. Durch den eingebauten MiniVib-Sender werden alle Signale auch an vorhandenen MiniVib-Empfängern und Funkblitzlampen signalisiert.

An der Rückseite des Gerätes befinden sich zwei 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen für den Anschluss an zwei Klingeln, z.B. eine Haustürklingel und eine Wohnungstürklingel. Jede Klingel wird dann durch eine andere Blitzfolge gemeldet. Außerdem werden die Signale an alle anderen vorhandenen Blitzlampen gesendet, damit auch diese blitzen. Wenn der elektrische Anschluss, wie z.B. bei einigen Wechselsprechanlagen, nicht möglich ist, empfehlen wir einen HGT-Mikrofonadapter zur akustischen Ankopplung. Wird die Multiflash über das mitgelieferte Kabel an eine Telefon/Fax-Steckdose (TAE) angeschlossen, wird jedes Läuten des Telefons durch drei Lichtblitze signalisiert und an weitere Blitzlampen gesendet.

Durch den eingebauten Handymelder wird auch das Handyklingeln (Umkreis 1-2 m) durch Lichtsignale gemeldet, z.B. wenn eine SMS empfangen wird. Diese Funktion ist von Vorteil, wenn das Handy keinen Vibrationsalarm besitzt, es gerade aufgeladen wird oder Sie es nicht ständig am Körper tragen wollen (Elektrosmog).

Blitzfolgen: Telefonklingel 1 (TAE)	=	* * *							
Telefonklingel 2 (Handy)	=	* * * *			* * * *				
Türklingel 1 (Haustür)	=	* * *	* *	* *	* *	* *	* *		
Türklingel 2 (Wohnungstür)	=	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *			
Personenrufknopf drücken	=	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *...



CONTROL-Anzeige für:

- Alarm
- Personenruf
- Bewegungsmelder
- Babyruf
- Telefon 2 (Handy)
- Telefon 1 (Festnetz)
- Klingel 2 (Wohnungstür)
- Klingel 1 (Haustür)


Handymelder-Taste:

1x kurz drücken = 1 Minute Pause (nur für Handymeldung)

1x lang drücken = Handymelder ein-/ausschalten


- Anschluss:
1. Anschluss an 230 V~ durch Einstecken des Netzkabels in eine Netzsteckdose in der Nähe der TAE-Dose.
 2. Anschluss an die Telefonleitung durch Einstecken des TAE-Steckers in eine N-codierte Buchse der TAE-Steckdose
 - 3a. Anschluss an die Türklingel durch einfache Parallelschaltung zur Klingel.
 - 3b. Anschluss an Gegensprechanlagen durch Anklemmen an die dafür vorgesehenen Schraubklemmen. Falls ein elektrischer Anschluss nicht möglich ist, können die Klingeleingänge mit Hilfe des **Mikrofonadapters für Klingel-Sender** auch akustisch betrieben werden.

Rückseite:

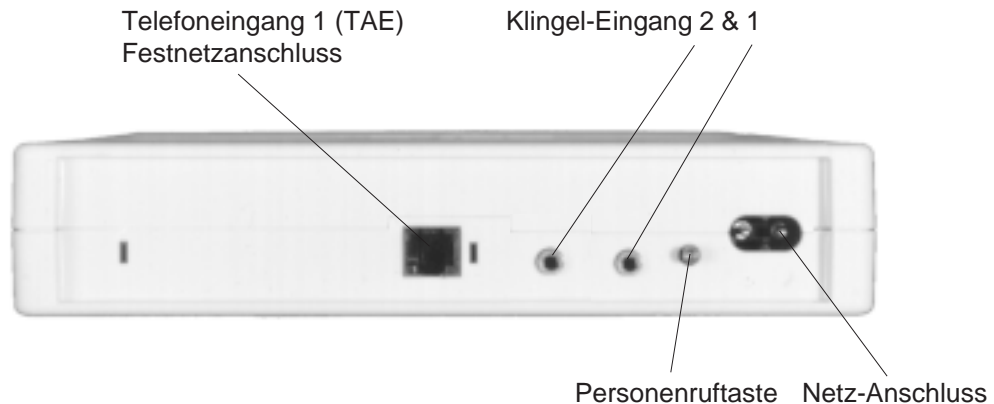

Kontrolle: Beim Drücken auf die Personenruftaste an der Rückseite des Gerätes müssen alle Blitzlampen in der Wohnung Lichtblitze abgeben. Vorhandene MniVib-Empfänger müssen die Signalfolge für Personenruf melden.

Hinweis: Die MultiFlash-Control MV besitzt acht Buchstabenkanäle (A-H). Alle Kanäle arbeiten mit Kontroll-Code-System.

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 4 Watt
	Empfindlichkeit der Klingeleingänge:	ca. 1 bis 24 Volt oder wahlweise Klingel-Eingang 2 als Kontakteingang
	Prüfzeichen:	
	Größe:	201 x 42 x 190 mm
	Gewicht:	ca. 500 g
	Farbe:	weiß
	Serien-Zubehör:	2 m Netzkabel, 3 m TAE-Kabel, 7 m Kabel zum Anschluss an eine Türklingel
	Sonder-Zubehör:	HGT-Mikrofonadapter für Klingel-Sender Adapter TAE N-NFN